



혈액검체 채취한 검체를 즉시 시험할 경우




비인두 도말 검체
혈액검체를 비인두까지 넣어 검체를 채취합니다.

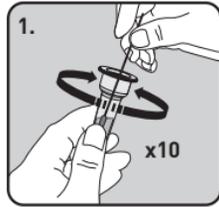


1. 검체추출용액에 넣고 10회이상 충분히 휘저어 줍니다.

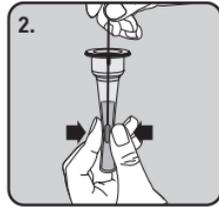


2. 튜브의 양 옆을 눌러 검체의 양 끝을 눌러 꺼냅니다.

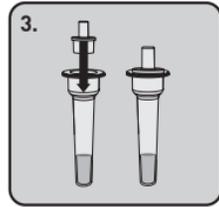

3. 튜브에 필터캡을 끝까지 밀어 장착합니다.

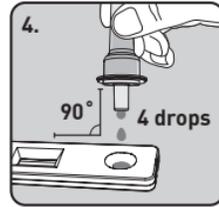

4. 테스트 카세트 주입구에 수직방향으로 4방울 주입합니다.

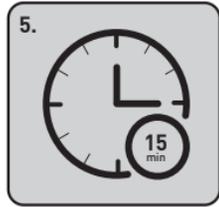


5. 15분 후 결과를 판정합니다.


수송배지검체를 사용하는 경우




수송배지검체를 냉장 보관한 경우 검사 30분 전에 실온에 꺼내둡니다.

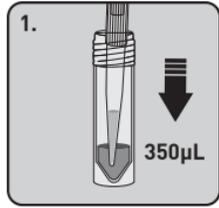


1. 수송배지검체 350µL를 파이펫으로 검체추출용액 튜브에 넣어줍니다.

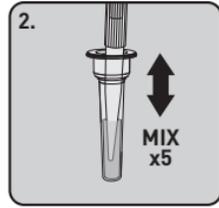


2. 파이펫으로 5회 정도 섞어줍니다.

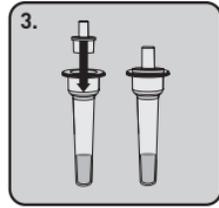

3. 튜브에 필터캡을 끝까지 밀어 장착합니다.

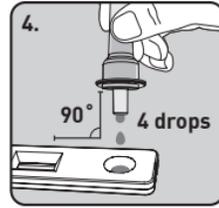


4. 테스트 카세트 주입구에 수직방향으로 4방울 주입합니다.

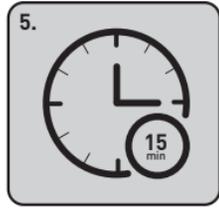



5. 15분 후 결과를 판정합니다.

Test Result




음성

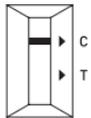

양성

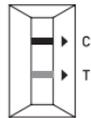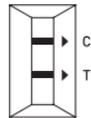

재시험

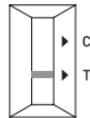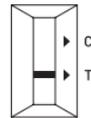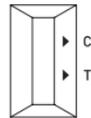

사용법 동영상 QR Code

